

191119, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала 93 А, пом. 1235
Тел.: +7 (812)-647-74-47 e-mail: commerce@med-mr.com
сайт [http:// med-mr.com](http://med-mr.com)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Мочеприемники MR

Мочеприемник ножной MR 750 мл

Предназначен для сбора мочи у пациентов в стационарных и амбулаторных условиях

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- проверить целостность упаковки и срок годности изделия
- надеть перчатки после предварительной обработки рук
- аккуратно вскрыть индивидуальную упаковку, извлечь мочеприемник
- удостовериться, что клапан выпускного отверстия закрыт
- зафиксировать мочеприемник в вертикальном положении на передней поверхности бедра, используя специальные крепления таким образом, чтобы обеспечить свободный ток мочи, либо зафиксировать мочеприемник другим способом.

* Мочеприемник всегда должен располагаться ниже уровня мочевого пузыря.

- снять защитный колпачок с коннектора на трубке мочеприемника, подсоединить коннектор к мочевому катетеру
- использовать шкалу на передней поверхности мочеприемника для считывания показаний заполнения мочеприемника мочой
- для опорожнения мочеприемника: удерживая мочеприемник над емкостью, открыть клапан выпускного отверстия, когда мешок станет пустым, снова закрыть клапан выпускного отверстия

- производить своевременную замену мочеприемника
- обработать и утилизировать в установленном порядке

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Индивидуальная непереносимость

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:



- для однократного применения



- не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки



- не стерилизовать повторно



- стерилизовано оксидом этилена

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

- хранить при температуре от -25 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80%, избегать резкого перепада температуры

Срок годности 5 лет (дата изготовления указана на упаковке)

РУ №РЗН 2017/6189 от 04.09.2017

Производитель

НИНГБО ХАЙ-ТЕК ЮНИКМЕД ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД",
Китай, NINGBO HI-TECH UNICMED IMP. & EXP. CO., LTD, 11/F, Green
Town Lvyuan Tower, 588 Canghai Road, 315040 Ningbo, P.R. China

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО "MR МЕД"