

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Катетеры урологические MR

Катетер урологический MR Нелатона женский СН-06; СН-08;
СН-10; СН-12; СН-14; СН-16; СН-18; СН-20; СН-22

предназначен для катетеризации мочевого пузыря.

ПОКАЗАНИЯ

острая и хроническая задержка мочи; получение мочи для исследования;
местное лечение заболеваний, промывание мочевого пузыря

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

-повреждение мочеиспускательного канала, острый уретрит, воспалительные процессы мочевого пузыря, кровотечение при свежей травме мочеиспускательного канала, аллергическая реакция на поливинилхлорид.

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

кровотечение, гематома, разрыв стенки мочеиспускательного канала, инфекция мочевыводящих путей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- проверить целостность упаковки и срок годности изделия
- надеть перчатки после предварительной обработки рук
- обработать отверстие мочеиспускательного канала раствором фурациллина
- вскрыть упаковку, взять стерильный катетер, сдавив его стерильным пинцетом, в правую руку ближе к терминальному концу (4-5 см)
- обильно смазать конец катетера стерильным вазелиновым маслом
- свободный конец катетера захватить между 4 и 5 пальцами правой руки
- свободный конец опустить в емкость для сбора мочи или подсоединить к мочеприемнику

- соблюдая правила асептики, ввести катетер в отверстие мочеиспускательного канала до появления мочи
- закрепить катетер с помощью лейкопластыря
- по окончании выведения мочи катетер извлечь (нажав при этом на надлобковую область ладонью левой руки)
- промокнуть отверстие уретры стерильным тампоном
- обработать и утилизировать катетер в установленном порядке.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

в стационарных клинических условиях специально обученным медицинским персоналом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:



- для однократного применения



- не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки



- не стерилизовать повторно



-стерилизовано оксидом этилена

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

- хранить при температуре от -25 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80%, избегать резкого перепада температуры

Срок годности 5 лет (дата изготовления указана на упаковке)

№РЗН 2018/7547 от 31.08.2018

Производитель

НИНГБО ХАЙ-ТЕК ЮНИКМЕД ИМП. ЭНД ЭКСП. КО., ЛТД",
КНР, NINGBO HI-TECH UNICMED IMP.& EXP. CO., LTD, 11/F, Green
Town Lvyuan Tower, 588 Canghai Road, 315040 Ningbo, P.R. of China
Тел. +86-574-8764 1261; e-mail: info@unicmed.com

**Уполномоченный представитель производителя
на территории РФ: ООО "MR MED"**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Катетеры урологические MR

Катетер урологический MR Нелатона мужской СН-06; СН-08;
СН-10; СН-12; СН-14; СН-16; СН-18; СН-20; СН-22.

предназначен для катетеризации мочевого пузыря.

ПОКАЗАНИЯ

острая и хроническая задержка мочи; получение мочи для исследования;

местное лечение заболеваний, промывание мочевого пузыря

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

повреждение мочеиспускательного канала, острый уретрит, простатит, кавернит, орхоэпидидимит, кровотечение при свежей травме мочеиспускательного канала, аллергическая реакция на поливинилхлорид.

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

кровотечение, гематома, разрыв стенки мочеиспускательного канала, инфекция мочевыводящих путей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- проверить целостность упаковки и срок годности изделия
- надеть перчатки после предварительной обработки рук
- обработать отверстие мочеиспускательного канала раствором фурациллина
- вскрыть упаковку, взять стерильный катетер, сдавив его стерильным пинцетом, в правую руку ближе к терминальному концу (4-5 см)
- обильно смазать конец катетера стерильным вазелиновым маслом
- свободный конец катетера захватить между 4 и 5 пальцами правой руки

- соблюдая правила асептики, ввести катетер в отверстие мочеиспускательного канала до появления мочи
- закрепить катетер с помощью лейкопластыря
- по окончании выведения мочи катетер извлечь (нажав при этом на надлобковую область ладонью левой руки)
- промокнуть отверстие уретры стерильным тампоном
- обработать и утилизировать катетер в установленном порядке.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

в стационарных клинических условиях специально обученным медицинским персоналом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:



- для однократного применения



- не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки



- не стерилизовать повторно



- стерилизовано оксидом этилена

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

- хранить при температуре от -25 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80%, избегать резкого перепада температуры

Срок годности 5 лет (дата изготовления указана на упаковке)
№РЗН 2018/7547 от 31.08.2018

Производитель

НИНГБО ХАЙ-ТЕК ЮНИКМЕД ИМП. ЭНД ЭКСП. КО., ЛТД",
KHP, NINGBO HI-TECH UNICMED IMP. & EXP. CO., LTD, 11/F, Green
Town Lvyuan Tower, 588 Canghai Road, 315040 Ningbo, P.R. of China
Тел. +86-574-8764 1261; e-mail: info@unicmed.com

Уполномоченный представитель производителя
на территории РФ: ООО "MR MED"