



191119, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала 93 А, пом. 1235
Тел.: +7 (812)-647-74-47 e-mail: commerce@med-mr.com
сайт [http:// med-mr.com](http://med-mr.com)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Трубки эндотрахеальные MR

Трубка эндотрахеальная MR с манжетой I.D. 3.0 CH-12; I.D. 3.5 CH-14;
I.D. 4.0 CH-16; I.D. 4.5 CH-18; I.D. 5.0 CH-20; I.D. 5.5 CH-22; I.D. 6.0 CH-24;
I.D. 6.5 CH-26; I.D. 7.0 CH-28; I.D. 7.5 CH-30; I.D. 8.0 CH-32; I.D. 8.5 CH-34;
I.D. 9.0 CH-36; I.D. 9.5 CH-38; I.D. 10.0 CH-40

Предназначена для интубации трахеи с целью проведения вспомогательной или искусственной вентиляции легких у больного

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- повреждение шейного отдела позвоночника
- процедуры с использованием лазерного луча или электрохирургических активных электродов

ОСЛОЖНЕНИЯ:

травмирование окружающих тканей ротовой полости, глотки и гортани, носовой раковины; ларинго- и бронхоспазм; повреждение пищевода; аспирация содержимого ротоглотки и желудка в трахеобронхиальное дерево; кровотечение; обильное слюнотечение, рвота

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:




- проверить целостность упаковки и срок годности изделия
- надеть перчатки после предварительной обработки рук
- аккуратно вскрыть индивидуальную упаковку, извлечь трубку
- перед введением эндотрахеальной трубки проверить, чтобы манжета находилась в нераздутом состоянии
- проверить надежность фиксации коннектора к трубке
- эндотрахеальную трубку проводят через раскрытую голосовую щель с помощью ларингоскопа или фибробронхоскопа в трахею

- манжета должна располагаться в верхних отделах трахеи
- раздуть воздухом манжету с помощью шприца через пилотный баллон
- закрепить эндотрахеальную трубку в нужном положении (специальный набор для фиксации эндотрахеальной трубки)
- по окончании интубации с помощью шприца из манжеты через пилотный баллон убрать воздух и извлечь трубку
- обработать и утилизировать трубку в установленном порядке

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

в стационарных клинических условиях специально обученным медицинским персоналом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

-  -для однократного применения
-  - не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки
-  -не стерилизовать повторно

STERILE EO -стерилизовано оксидом этилена

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

- хранить при температуре от -25 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80%, избегать резкого перепада температуры

Срок годности 5 лет (дата изготовления указана на упаковке)

№РЗН 2018/7530 от 24.08.2018

Производитель

НИНГБО ХАЙ-ТЕК ЮНИКМЕД ИМП. ЭНД ЭКСП. КО., ЛТД.", КНР,
NINGBO HI-TECH UNICMED IMP.& EXP. CO., LTD., 11/F, Green
Town Lvyuan Tower, 588 Canghai Road, 315040 Ningbo, P.R. of China
Тел. +86-574-8764 1261; e-mail: info@unicmed.com

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО "MR MED"



191119, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала 93 А, пом. 1235
Тел.: +7 (812)-647-74-47 e-mail: commerce@med-mr.com
сайт [http:// med-mr.com](http://med-mr.com)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Трубки эндотрахеальные MR

Трубка эндотрахеальная MR без манжеты I.D. 2.0 CH-08;
I.D. 2.5 CH-10; I.D. 3.0 CH-12; I.D. 3.5 CH-14; I.D. 4.0 CH-16;
I.D. 4.5 CH-18; I.D. 5.0 CH-20

Предназначена для интубации трахеи с целью проведения вспомогательной или искусственной вентиляции легких у больного

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

-повреждение шейного отдела позвоночника
-процедуры с использованием лазерного луча или электрохирургических активных электродов

ОСЛОЖНЕНИЯ:

травмирование окружающих тканей ротовой полости, глотки и гортани, носовой раковины; ларинго- и бронхоспазм; повреждение пищевода; аспирация содержимого ротоглотки и желудка в трахеобронхиальное дерево; кровотечение; обильное слюнотечение, рвота

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- проверить целостность упаковки и срок годности изделия
- надеть перчатки после предварительной обработки рук
- аккуратно вскрыть индивидуальную упаковку, извлечь трубку
-проверить надежность фиксации коннектора к трубке
-эндотрахеальную трубку провести через раскрытую голосовую щель с помощью ларингоскопа или фибробронхоскопа в трахею
-закрепить эндотрахеальную трубку в нужном положении (специальный набор для фиксации эндотрахеальной трубки)

-по окончании интубации извлечь трубку
-обработать и утилизировать трубку в установленном порядке

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

в стационарных клинических условиях специально обученным медицинским персоналом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:



-для однократного применения



- не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки



-не стерилизовать повторно



-стерилизовано оксидом этилена

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

хранить при температуре от -25 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80%, избегать резкого перепада температуры

Срок годности 5 лет (дата изготовления указана на упаковке)

№РЗН 2018/7530 от 24.08.2018

Производитель

НИНГБО ХАЙ-ТЕК ЮНИКМЕД ИМП. ЭНД ЭКСП. КО., ЛТД.", КНР,
NINGBO HI-TECH UNICMED IMP.& EXP. CO., LTD., 11/F, Green
Town Lvyuan Tower, 588 Canghai Road, 315040 Ningbo, P.R. of China
Тел. +86-574-8764 1261; e-mail: info@unicmed.com

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО "MR MED"